



Augen-Notfallplan



www.medland.de

1 Bestimmen Sie den Schadstoff	2 Wählen Sie die Richtige Flasche und Spüllösung	3 Setzen Sie die Spüllung fort	4 Spülen Sie wie angegeben
Fremdkörper z.B.: Staub Schmutz, Metall- und Holzsplitter	Augenspüllösung Kochsalz steril Modell m86/ m87/ m88	Augenspüllösung Kochsalz steril Modell m86/ m87/ m88	Solange spülen, bis die Fremdkörper herausgespült sind.
Säureschäden	pH Neutral Modell m82 oder m83	Augenspüllösung Kochsalz steril Modell m86/ m87/ m88	Augen mit pH Neutral 2 Minuten spülen, bis die Flasche entleert ist. Die Spüllung mit der Augenspüllung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Alkalische Schäden	pH Neutral Modell m82 oder m83	Augenspüllösung Kochsalz steril Modell m86/ m87/ m88	Augen mit pH Neutral 2 Minuten spülen, bis die Flasche entleert ist. Die Spüllung mit der Augenspüllung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Sonstige Schäden (z.B. Lösungsmittel und Öle)	Augenspüllösung Kochsalz steril Modell m86/ m87/ m88	Augenspüllösung Kochsalz steril Modell m86/ m87/ m88	Augen solange spülen, bis das unangenehme Gefühl nicht mehr spürbar ist. Die Spüllung mit der Augenspüllung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.



m83 / 500ml

Art. 391153



m82 / 200ml

Art. 391154

medland
GmbH & Co.KG
Postfach 1215
65220 Taunusstein
Tel. 06128-7488-0
www.medland.de



m86 / 1000ml

Art. 391129



m88 / 500ml

Art. 391128



m87 / 200ml

Art. 391138

Wichtig ! Bei allen Schäden soll das Auge mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden. Die Augenspüllflaschen während des Spülvorgangs leicht drücken. Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung oder -verschmutzung einzuholen. Die Spüllung sollte auch während des Transportes zum Arzt fortgesetzt werden.