



Augen-Notfallplan



medland
www.medland.de

1 Bestimmen Sie den Schadstoff	2 Wählen Sie die Richtige Flasche und Spüllösung	3 Setzen Sie die Spüllung fort	4 Spülen Sie wie angegeben
Fremdkörper z.B.: Staub Schmutz, Metall- und Holzsplitter	Augenspüllösung Kochsalz steril Modell m86 od. m87	Augenspüllösung Kochsalz steril Modell m86 od. m87	Solange spülen, bis die Fremdkörper herausgespült sind.
Säureschäden	pH Neutral z.B. Modell m82	Augenspüllösung Kochsalz steril Modell m86 od. m87	Augen mit pH Neutral 2 Minuten spülen, bis die Flasche entleert ist. Die Spüllung mit der Augen- spüllung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Alkalische Schäden	pH Neutral z.B. Modell m82	Augenspüllösung Kochsalz steril Modell m86 od. m87	Augen mit pH Neutral 2 Minuten spülen, bis die Flasche entleert ist. Die Spüllung mit der Augen- spüllung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Sonstige Schäden (z.B. Lösungsmittel und Öle)	Augenspüllösung Kochsalz steril Modell m86 od. m87	Augenspüllösung Kochsalz steril Modell m86 od. m87	Augen solange spülen, bis das unangenehme Gefühl nicht mehr spürbar ist. Die Spüllung mit der Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.



m81 / 1000ml

Art. 391152



m82 / 200ml

Art. 391154



medland

GmbH & Co.KG

Postfach 1215

65220 Taunusstein

Tel. 06128-7488-0

www.medland.de



m86 / 1000ml

Art. 391129



500ml

Art. 391128



m87 / 200ml

Art. 391138

Wichtig ! Bei allen Schäden soll das Auge mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden. Die Augenspüllflaschen während des Spülvorgangs leicht drücken. Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung oder -verschmutzung einzuholen. Die Spüllung sollte auch während des Transportes zum Arzt fortgesetzt werden.