



# AUGEN-NOTFALLPLAN



1 Bestimmen Sie den Schadstoff	2 Wählen Sie die richtige Flasche und Spüllösung	3 Setzen Sie die Spülung fort	4 Spülen Sie wie angegeben
<b>Fremdkörper</b> z.B. Schmutz, Staub, Metall- und Holzsplinter	<b>Augenspüllösung</b> Kochsalz steril Modell m86 und m87	<b>Augenspüllösung</b> Kochsalz steril Modell m86 und m87	Augen solange spülen bis die Fremdkörper herausgespült sind
<b>Säureschäden</b>	<b>pH Neutral</b> z.B. Modell m82	<b>Augenspüllösung</b> Kochsalz steril Modell m86 und m87	Augen mit pH Neutral 2 Minuten spülen oder bis die Flasche entleert ist. Diese Spülung mit der Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
<b>Alkalische Schäden</b>	<b>pH Neutral</b> z.B. Modell m82	<b>Augenspüllösung</b> Kochsalz steril Modell m86 und m87	Augen mit pH Neutral 2 Minuten spülen oder bis die Flasche entleert ist. Diese Spülung mit der Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
<b>Andere Chemikalien</b> (z.B. Lösemittel und Öle)	<b>Augenspüllösung</b> Kochsalz steril Modell m86 und m87	<b>Augenspüllösung</b> Kochsalz steril Modell m86 und m87	Augen solange spülen bis das unangenehme Gefühl nicht mehr spürbar ist. Die Spülung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.



m86 / 1000ml  
Art. 391129



500ml  
391128



m87 / 200ml  
Art. 391138



m82 / 200ml  
Art. 391154



m81 / 1000ml  
Art. 391152

**medland GmbH & Co. KG**  
**Postfach 1215**  
**65220 Taunusstein**  
**Tel: 06128/7488-0 / Fax: 06128/7488-25**  
**info@medland.de**  
**Shop: [www.medland.de](http://www.medland.de)**

**WICHTIG!** Bei allen Schäden soll das  
 Auge mit einem weichen und gleichmäßigen  
 Strahl gespült werden. Die Augenspülflaschen  
 während des Spülvorgangs leicht drücken.  
 Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung  
 oder -verschmutzung einzuholen. Die Spülung  
 sollte auch während des Transports zum Arzt  
 fortgeführt werden.